



Vous avez choisi d'acquérir un produit de Drive DeVilbiss Healthcare France : le rollator LONDRES ; nous vous en remercions et vous félicitons de ce choix. Nous vous convions à lire cette notice d'utilisation et d'entretien afin de mieux connaître les performances et les qualités du rollator LONDRES.

**Mise en garde :** La corrélation entre la pathologie du patient et le type de produit à utiliser doit être faite par un professionnel de la santé. Ne pas utiliser le rollator avant d'avoir reçu, de la part du professionnel, une formation et des consignes de sécurité.



### AVERTISSEMENTS :

- Seuls les patients dont le poids n'excède pas 100 kg peuvent bénéficier de ce rollator.
- L'utilisation du rollator sur un sol irrégulier, de mauvaise qualité, inégal ou en pente est à proscrire absolument sous peine de faire basculer le patient.
- La première mise en place doit se faire avec le concours d'une personne habilitée qui procédera aux réglages de l'appareil, adaptés aux besoins de l'utilisateur.



### Présentation de l'appareil

- Le châssis est livré monté, seules les poignées et les manettes de blocage sont livrées séparément.
- Après avoir contrôlé l'état de l'appareil, vérifier la présence et le serrage de tous les éléments mécaniques, positionner l'appareil sur ses roues et pieds puis déplier le châssis en écartant simultanément les deux demi-côtés jusqu'à ce que le mécanisme de pliage soit totalement verrouillé (système à l'horizontal). Pour replier le rollator, tirer la barre transversale vers le haut.
- Insérer les poignées dans les tubes, procéder au réglage en hauteur (**Attention : ne jamais dépasser le repère maximum MAX gravé sur le tube**), puis insérer, de chaque côté et au même niveau, les vis, les rondelles et visser les manettes de blocage (rondelles et manettes positionnées vers l'extérieur du châssis).

### IMPORTANT :

- Le professionnel de santé doit s'assurer que le patient maîtrise l'utilisation du rollator et les consignes de sécurité.
- Vérifier la stabilité du cadre du rollator avant de le confier au patient.
- L'utilisateur doit s'asseoir sur le siège uniquement depuis l'intérieur du rollator et non pas par le devant.
- Ne pas suspendre de poids aux poignées afin d'éviter tout risque de déséquilibre.
- Ne pas tenter de déplacer le rollator si l'utilisateur est assis sur le siège.
- Ne pas se mettre debout sur le siège.

### Utilisation :

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vérifier que la hauteur des poignées est bien adaptée à la morphologie du patient.
- Avant chaque utilisation, vérifier la stabilité, la fixation des poignées et que le rollator est correctement verrouillé en position dépliée.
- Positionner l'appareil devant soi (les roues à l'avant), tenir fermement les poignées. Lorsque le corps est en équilibre, incliner légèrement le rollator sur ses roues, pousser lentement puis reposer les patins arrière sur le sol. Avancer à l'intérieur du cadre jusqu'à retrouver la position d'équilibre.
- Rabattre le siège en position horizontale, vérifier la stabilité du rollator, s'asseoir délicatement, les pieds situés du côté des patins.

**Attention :** Le siège est articulé, ne pas s'asseoir du côté des roues, ne pas faire des mouvements amples. Le siège doit être utilisé pour un bref repos et ne doit pas être utilisé à d'autres fins (toilette ou autres activités).

### Entretien régulier :

- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage.
- Vérifier régulièrement l'état des patins, des roues, du siège et des manchons de poignées ; les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
- Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage, des tubes et des soudures.

Seul un technicien habilité peut procéder à la maintenance et au remplacement de pièces fournies exclusivement par Drive DeVilbiss Healthcare France.

### Caractéristiques techniques :

Poids maximum utilisateur : = 100 kg  
 Largeur hors tout : 58 cm  
 Hauteur réglable : 79 à 96 cm (poignées)  
 Diamètre roues : 11,5 cm  
 Dimensions du siège : 37 x 20 x 3 cm

Largeur assise : 42 cm  
 Profondeur : 53 cm  
 Largeur hors tout plié : 14 cm  
 Hauteur sol/siège : 54 cm  
 Poids : 5,4 kg  
 Couleur : gris

### Conditions de Garantie :

La structure mécanique est garantie un an. Cette garantie correspond à un emploi normal de l'appareil et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Drive DeVilbiss Healthcare France.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Distributeur : Drive DeVilbiss Healthcare France  
 Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie - ZAC du Ban la Dame  
 BP19 - 54390 FROUARD - FRANCE - Tél : 03 83 495 495 - Fax : 03 83 495 496



Jiangyin Huashi Medical Equipment Co.,Ltd  
 NO.589, Hualu Road, Huashi Town, Jiangyin Jiangsu, CHINE



SUNGO Europe B.V.  
 Olympisch Station 24, 1076DE Amsterdam, PAYS BAS

